



medi Shoulder fix


Schulter-Immobilisations-Bandage

Shoulder immobilisation support


Bandage d'immobilisation de l'épaule

Vendaje para la inmovilización del hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.

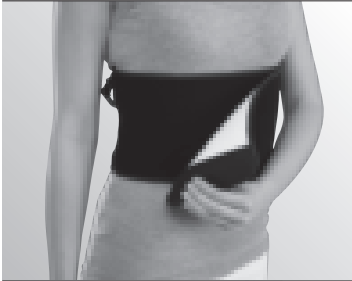

1

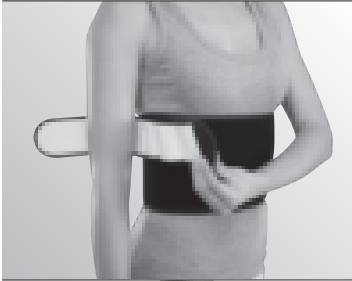

2



3



4

medi Shoulder fix

Назначение

Отводящая шина medi Shoulder fix может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

- Консервативная и послеоперационная терапия переломов проксимального отдела плечевой кости
- Консервативная и послеоперационная терапия переломов лопатки
- Консервативная и послеоперационная терапия разрыва акромиально-ключичного сочленения
- Консервативная терапия болезненного омартроза
- Консервативная и послеоперационная терапия импиджмент-синдрома
- Консервативная и послеоперационная терапия артроза акромиально-ключичного сочленения
- Послеоперационная терапия после протезирования плечевого сустава
- Консервативная терапия после вывиха плеча
- Консервативная терапия неполных вывихов плеча в хроническом состоянии
- Консервативная и послеоперационная терапия переломов дистального отдела плечевой кости

Противопоказания

Консервативная и послеоперационная терапия заднего вывиха плечевого сустава

Рекомендации по надеванию

1. Оберните широкую ленту вокруг тела и застегните ее точно под грудью.
2. Зафиксируйте поврежденную руку с помощью дополнительной ленты в

нижней трети плеча. Закрепите муфту впереди на широкой ленте. Раскройте муфту и поместите травмированную руку внутрь. Закройте муфту.

3. Пропустите узкую ленту поверх здорового плеча и соедините её с муфтой. Отрегулируйте по длине ленту с муфтой. Муфту можно также дополнительно зафиксировать при помощи специальной ленты с застежкой-липучкой.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!